

Pruebas de droga | **Nuestro producto está almacenado en bodegas climatizadas para garantizar resultados confiables.**
 5 sust. y 6 sust. (más ALCOHOL)

MODO DE USO - PASOS A SEGUIR



1. Retire la tapa protectora de la tarjeta y sumerja la misma en el recipiente con la muestra por 10 segundos.



2. **Atención:** Sumergir la tarjeta hasta llegar a la altura de la línea marcada, de esta manera evitamos que la prueba resulte inválida.



3. Retire del recipiente la tarjeta de la muestra y espere 5 minutos



4. Proceda a leer los resultados

SIMBOLOGIA DE RESULTADOS:



Nuestros tests de drogas están disponibles en tarjetas para la lectura de:

1.- Anfetamina	AMP
2.- Cocaína	COC
3.- Marihuana	THC
4.- Opiáceo	OPI
Heroina, H, Codeína, Oxiconona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo	
5.- Metanfetamina	MET
6.- Alcohol	ETG

NOTA IMPORTANTE: La intensidad de las líneas en el resultado del test varían algunas veces debido a:

Cuan diluída esté la orina, el nivel de PH o proteína de la misma o en su defecto si sumergen la tarjeta más arriba de la línea marcada.

La interferencia de un metabolito (molécula en el organismo) en la orina que se asemeje a la droga.

PREGUNTA MAS FRECUENTE:

Si las líneas en los recuadros del test son muy débiles. Significa que el resultado es negativo?.

No importa que tan débil sea la línea en los recuadros. Eso equivale a un resultado negativo en la prueba.



PRESENTACIONES PRUEBAS DE DROGA A ELEGIR AHORA PARA DETECTAR ALCOHOL



OPCIÓN 1.-
1 Tarjeta prueba de droga.
(Sellada)

OPCIÓN 2 - Kit con funda ziploc

A.- 1 Funda Ziploc B.- 1 Tarjeta prueba de droga
C.- 1 Guante de látex D.-1 Vasito muestra de orina

